

NiTi Brush for periimplantitis-remove everything except the original shape of the implant

임플란트주위염? NiTi Brush **싹쓸이** 로 싹~~악 쓸어버리세요





우리는 임플란트를 치료합니다

보철물을 제거하지 않고 치료가 가능합니다

고연령 보험임플란트에 매우 효과적입니다

We manage
periimplantitis
using NiTi Brush

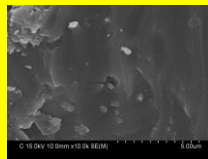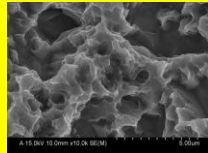


NiTi Brush for periimplantitis-remove everything except the original shape of the implant

임플란트주위염? NiTi Brush **싹쓸이**  로 싹~~악 쓸어버리세요

Peri-Implantitis? Just brush it away - NiTi Brush

Using implant motor RPM 600 ~ 1,200 / 1m OK

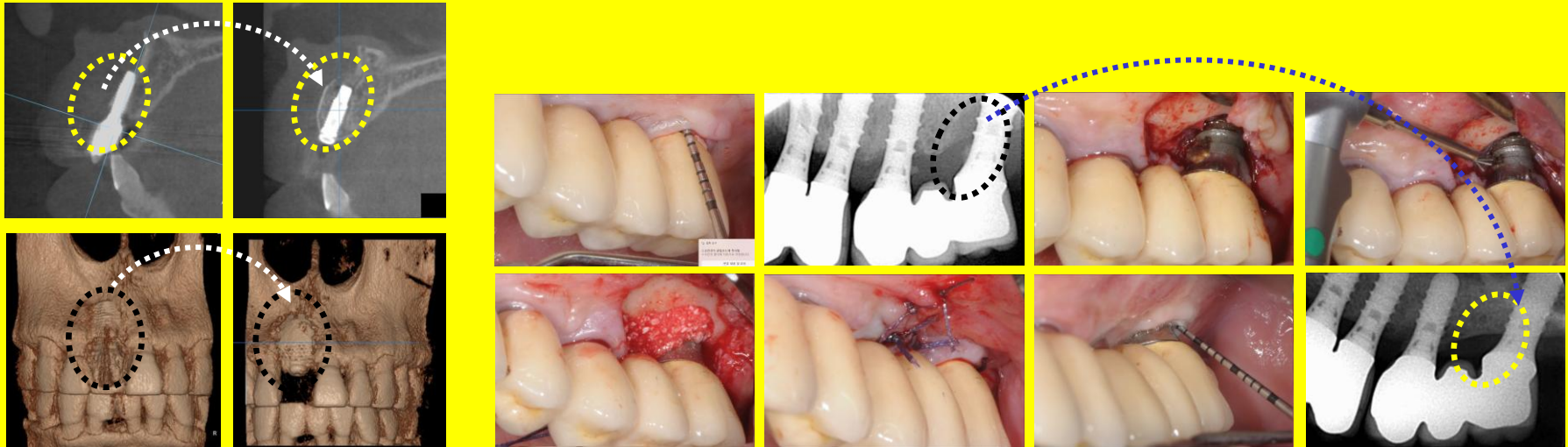

NiTi Brush for periimplantitis-remove everything except the original shape of the implant

임플란트주위염? NiTi Brush **싹쓸이**로 싸~~악 쓸어버리세요


1. Diagnosis periimplantitis

Measure the depth of pocket



1. Probe로 Pocket의 깊이를 측정해 주세요

2. Select a NiTi Brush according to case

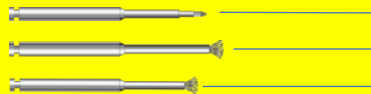

Nano for 1 to 2 thread(s) exposure

Pocket for more than 2 threads exposure

Pocket Short for (Molar)

2. 대부분의 경우 Pocket을 사용하시면 됩니다

싹쓸이는 Nano, Pocket 및 Pocket 등 3개의 모델로 구성되어 있으나, 대부분의 경우 Pocket 을 사용하시면 무난합니다(flap open 요망). 다만, 치료 후 일정 기간이 경과한 다음에 주위염이 재발될 기미가 보일 경우, Flap open 하지 않고 Nano를 사용하시는 것도 가능합니다.

3. Sterilization before use



Before use, sterile the NiTi Brush for periimplantitis

Using sterile pouch & autoclave

134 °C / 15 minutes

3. 사용 전 멸균


사용 전 멸균 필수 : 오토클레이브 **134 °C / 15 minutes**

멸균 후 바로 사용하세요.(멸균 후 재보관 금지)

반드시 1회용으로 사용하십시오.

NiTi Brush for periimplantitis-remove everything except the original shape of the implant

4. Rotate NiTi Brush: Polishing Surface

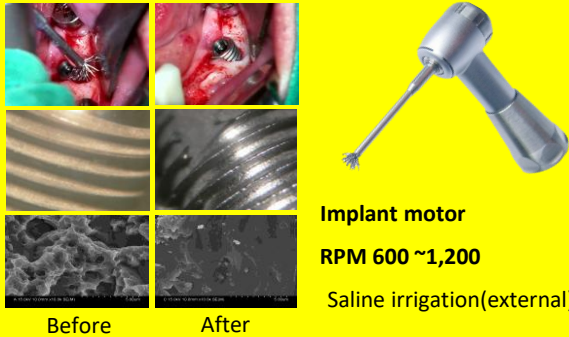

Debridement & Decontamination

Using implant motor

Rotating speed is **RPM 600 ~1,200**

Extensive external saline irrigation during brushing

Make rough surface into Machined Smooth surface

Remove "implant surface" & "surrounding tissue" at the same time (No more curetting).

Brushing time

- Premium brand(Strau**, Nob**): 30 ~40 Seconds
- Other brand: 1~2 Minutes or so.

표면 Polishing 및 오염물질 제거

반드시 임플란트 모터를 사용하십시오.


RPM 600 ~1,200 유지해 주세요.
이리게이션을 MAX로 해주십시오.

싹쓸이로 임플란트의 표면 뿐 아니라 주변의 연조직도 함께 제거하세요

임플란트 표면이 반짝반짝 광택이 나는 것을 육안으로 확인할 수 있습니다.

Brushing time은 약 1분 안팎입니다.

5. Chemical treatment: After brushing

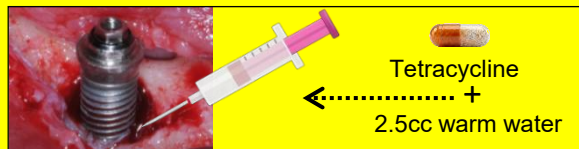

Using syringe, sprinkle it to brushed surface & tissue
Wait 3 minutes, then wash away T/C using saline

Open the Tetracycline 250mg capsule

Place Tetracycline 250mg in 2.5cc warm water(saline)

Using syringe, sprinkle it to brushed surface & tissue

Wait 3 minutes, then wash away T/C using saline

Other chemical treatment is another choice
(ex. Minocycline....)

Tetracycline 250mg 캡슐을 열어

T/C를 2.5CC의 따뜻한 셀라인에 희석하십시오.

주사기로 T/C 용액을 시술 부위에 도포하십시오.

도포 후 3 분 뒤에 셀라인으로 행귀주십시오.

T/C 외에 미노사이클린(미노클린) 등 기타 제품으로
처치해 주셔도 무방합니다.

GBR CASE 경우 미노클린 등을 사용하신다면,
미노클린을 도포하고 그 위에 바로 GBR을 하셔도
무방합니다.

6. GBR: After chemical treatment