

임플란트주위염? NiTi Brush **싹쓸이**로 싸~~악 쓸어버리세요





우리는 임플란트를 치료합니다
보철물을 제거하지 않고 치료가 가능합니다
고연령 보험임플란트에 매우 효과적입니다

건강보험

175,800 원

청구하세요

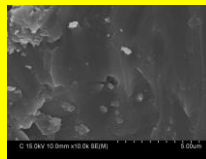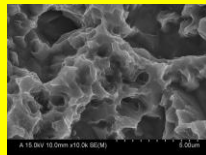

NiTi Brush 를 활용한 임플란트 주위염 외과적 치료(치근면처치술) 건강보험 청구 및 비용 분석 예시

(아래 예시의 행위코드 및 단가는 실제와 상이할 수 있습니다. 참고용으로만 사용하세요)

GBR 없이 치근면처치술

흐름 구분	임상행위 및 단계	행위코드 및 단위	분류번호	상대가치점수	단가	단가	공단부담(70%)	환자부담(30%)
진단 및 준비	진찰(재진)	AA200	가1나(6)	110.46	11,170	11,170	7,819	3,351
	치주낭측정검사(PPT)	E9020(1/3 약당)	나-902	20.9	2,110	2,110	1,477	633
	파노라마 촬영 가.일반	G9701	다-197	148.95	15,060	15,060	10,542	4,518
	하치조신경 전달마취 경우	L0905(1/2 약당)	바-9마	60.67	6,130	6,130	4,291	1,839
외과적 접근	치은박리소파-간단	U1051 (1/3 약당)	차-105	723.45	73,140		51,198	21,942
	치은박리소파-복잡	U1052 (1/3 약당)		1141.72		115,430	80,801	34,629
핵심 치료	치근면처치술 [NiTi BRRUSH를 사용하는 단계]	U1060 (200% 가산) 12,950원 X 200% = 25,900원	차106	128.13	25,900	25,900	18,130	7,770
총계	임상 치료 완료	총 청구액			133,510	175,800		

GBR + 치근면처치술

흐름 구분	임상행위 및 단계	행위코드 및 단위	분류번호	상대가치점수	단가	공단부담(70%)	환자부담(30%)
진단 및 준비	진찰(재진)	AA200	가1나(6)	110.46	11,170	7,819	3,351
	치주낭측정검사(PPT)	E9020(1/3 약당)	나-902	20.9	2,110	1,477	633
	파노라마 촬영 가.일반	G9701	다-197	148.95	15,060	10,542	4,518
	하치조신경 전달마취 경우	L0905(1/2 약당)	바-9마	60.67	6,130	4,291	1,839
외과적 접근(골이식/차폐막)	조직유도재생술(나)(1) + 치근면처치술	U1082	차-108 나(1)	1538.59	155,550	108,885	46,665
핵심 치료	치근면처치술 [NiTi BRRUSH를 사용하는 단계]	U1060 (200% 가산) 12,950원 X 200% = 25,900원	차106	128.13	25,900	18,130	7,770
총계	골이식 포함 임상 치료 완료	총 청구액			215,920	151,144	64,776

NiTi Brush 를 활용한 임플란트 주위염 외과적 치료(치근면처치술) 건강보험 청구 및 비용 분석 예시

치주염 상병명(예: K05.31 만성 복합치주염) 적용 및 청구프로그램 내역설명에 “임플란트 치아”로 선택

치근면처치술은 단독으로 청구할 수 없고 최소 치은박리소파술 이상 시행 시 부가적으로 산정

치근면처치술(RSD): 임플란트 치아에 치근면처치술을 시행한 경우는 자연치아와 동일하게 청구 후 시행부위가 임플란트 치아임을 내역설명을 통해 알리고 횟수를 “2”로 조정하여 청구

치근면처치술(RSD): 치과임플란트 치아에 표면처치술(표면세정, 무독화시술, 나사선성형술 등)

치과임플란트 치아에 치주 외과적 수술 처치 후에 실시하는 치과임플란트 표면처치술(나사선성형술 등)을 실시한 경우에는

1~2개 치아에 실시하였다하더라도 차106 치근면처치술[1/3악당] 소정점수의 200%를 산정.

치근면처치술은 단독으로 시행 및 청구가 불가하며, 치주수술 시에만 병행하여 산정 가능함.

치주파트 진료는 상위 진료 1가지만 인정됨.


아래 항목 중 1가지만 선택하여 치근면처치술과 함께 청구가 가능. 동일 부위에서 2가지 이상의 중복 산정은 불가.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. 치은박리소파술 (간단) + 치근면처치술 | 5. 조직유도재생술(가) + 치근면처치술 |
| 2. 치은박리소파술 (복잡) + 치근면처치술 | 6. 조직유도재생술(나(1)) + 치근면처치술 |
| 3. 치조골결손부골이식술(가) + 치근면처치술 | 7. 조직유도재생술(나(2)) + 치근면처치술 |
| 4. 치조골결손부골이식술(나) + 치근면처치술 | |

임플란트주위염? NiTi Brush 로 싸~~악 쓸어버리세요

Peri-Implantitis? Just brush it away - NiTi Brush

임플란트 모터 장착 RPM 600 ~ 1,200 / 1분 OK

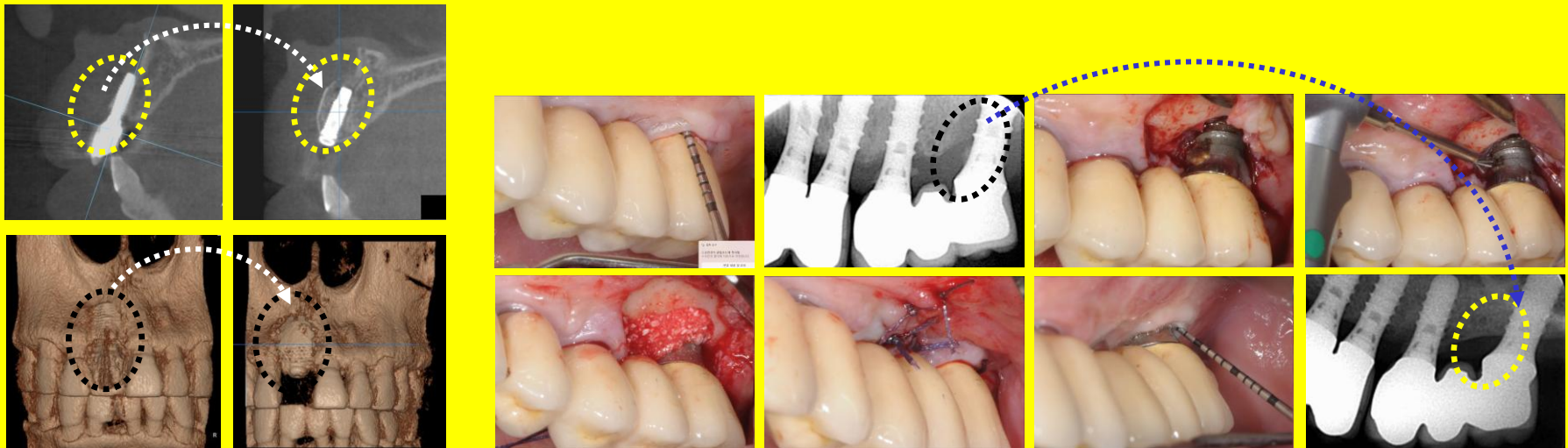

임플란트주위염? NiTi Brush **싹쓸이**로 싸~~악 쓸어버리세요


1. Diagnosis periimplantitis

Measure the depth of pocket



1. Probe로 Pocket의 깊이를 측정해 주세요

2. Select a NiTi Brush according to case

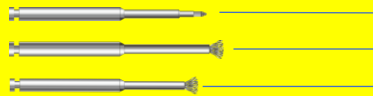

Nano for 1 to 2 thread(s) exposure

Pocket for more than 2 threads exposure

Pocket Short for (Molar)

2. 대부분의 경우 Pocket을 사용하시면 됩니다

싹쓸이는 Nano, Pocket 및 Pocket 등 3개의 모델로 구성되어 있으나, 대부분의 경우 Pocket 을 사용하시면 무난합니다(flap open 요망). 다만, 치료 후 일정 기간이 경과한 다음에 주위염이 재발될 기미가 보일 경우, Flap open 하지 않고 Nano를 사용하시는 것도 가능합니다.

3. Sterilization before use



Before use, sterile the NiTi Brush for periimplantitis

Using sterile pouch & autoclave

134 °C / 15 minutes


3. 사용 전 멸균

사용 전 멸균 필수 : 오토클레이브 134 °C / 15 minutes

멸균 후 바로 사용하세요.(멸균 후 재보관 금지)

반드시 1회용으로 사용하십시오.

4. Rotate NiTi Brush: Polishing Surface

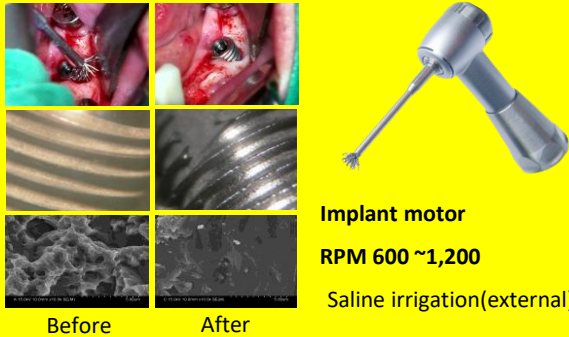

Debridement & Decontamination

Using implant motor

Rotating speed is **RPM 600 ~1,200**

Extensive external saline irrigation during brushing

Make rough surface into Machined Smooth surface

Remove “implant surface” & “surrounding tissue” at the same time (No more curetting).

Brushing time

- Premium brand(Strau**, Nob**): 30 ~40 Seconds
- Other brand: 1~2 Minutes or so.

표면 Polishing 및 오염물질 제거

반드시 임플란트 모터를 사용하십시오.


RPM 600 ~1,200 유지해 주세요.
이리게이션을 MAX로 해주십시오.

싹쓸이로 임플란트의 표면 뿐 아니라 주변의 연조직도 함께 제거하세요

임플란트 표면이 반짝반짝 광택이 나는 것을 육안으로 확인할 수 있습니다.

Brushing time은 약 1분 안팎입니다.

5. Chemical treatment: After brushing

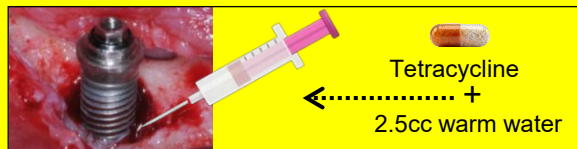

Using syringe, sprinkle it to brushed surface & tissue
Wait 3 minutes, then wash away T/C using saline

Open the Tetracycline 250mg capsule

Place Tetracycline 250mg in 2.5cc warm water(saline)

Using syringe, sprinkle it to brushed surface & tissue

Wait 3 minutes, then wash away T/C using saline

Other chemical treatment is another choice
(ex. Minocycline....)

Tetracycline 250mg 캡슐을 열어

T/C를 2.5CC의 따뜻한 셀라인에 희석하십시오.

주사기로 T/C 용액을 시술 부위에 도포하십시오.

도포 후 3 분 뒤에 셀라인으로 행귀주십시오.

T/C 외에 미노사이클린(미노클린) 등 기타 제품으로
처치해 주셔도 무방합니다.

GBR CASE 경우 미노클린 등을 사용하신다면,
미노클린을 도포하고 그 위에 바로 GBR을 하셔도
무방합니다.

6. GBR: After chemical treatment