

의료기기, 일회용, 재사용금지, 비멸균(반드시 멸균 후 사용)

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 해당제품의 포장용기가 파손된 곳은 없는지 점검한다.
- 2) 제품의 사용방법을 숙지한다.
- 3) 제품 사용 전에 Autoclave에 134℃에서 15분 이상 멸균한다.

나. 사용방법

- 1) 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않는다.
- 2) 심한 충격이나 바닥에 떨어뜨렸을 경우, 다른 기구로 대체하여 사용한다.
- 3) 사용도중 부식이나 크랙, 핀홀 등이 발견되었을 경우 즉시 사용을 중단하고 다른 기구로 대체하여 사용한다.
- 4) 아래와 같이 임플란트 엔진(모터)에 끼워서 장착하여 사용한다.



- 5) 장착 후에는 연결상태의 이상 유무를 확인 하고 사용한다.
- 6) 브러쉬 사용 시, 멸균수로 해당 부위를 충분히 세척(sterile saline irrigation)한다.

7) 브러쉬의 회전속도는 RPM 600 ~ 1200으로 유지한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법 : 1회용품임. 사용 후 폐기(재사용 금지)

■ 사용시 주의사항

- 1) 제품 사용 전에 Autoclave에 134℃에서 15분 이상 멸균한다.
- 2) 브러쉬의 회전속도는 RPM 600~1200으로 유지한다.
- 3) 멸균 후 재포장이나 보관하지 않고 즉시 사용한다.
- 4) 모든 안전수칙과 사용절차에 대해 숙지한 전문 의사가 사용하여야 한다.
- 5) 기구의 멸균 시 열폭이 발생할 수 있으므로 멸균기 제조업체의 지시사항에 따라야 한다.
- 6) 사용 중에 충격을 주지 말 것.
- 7) 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않는다.
- 8) 보관 및 사용시 문제가 발생하면 제조회사에 연락을 위하여 사후 조치 및 재발 방지를 강구한다.
- 9) 저장방법 및 유효기간 ① 저장방법 : 상온 실내 보관한다. ② 유효기간 : 반영구적
- 10) 티타늄 혹은 니켈 알러지(allergy)가 있는 환자에게 사용을 금함.
- 11) 부작용 보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)

2025/03 (Rev.03)