

NiTi Brush –싹쓸이 시술 사용 예시

(본 사용 예시는 특정인의 개인적 의견이며, 세부 사용방법은 첨부문서를 참고하세요)

- ① NiTi Brush는 내부 구조가 복잡하여, 시술 중 브러쉬 내부로 이물질이 들어가게 되면 이물질 제거가 어려워 재사용 시 교차감염의 우려가 있습니다. 그래서 **1회 용으로 사용하셔야** 합니다.
- ② 사용 전에 오토클레이브 134도에서 15분 이상 멸균해주세요.
- ③ **임플란트 엔진에 장착**하셔서,
- ④ **RPM 600~1200**으로 사용하시면 됩니다(너무 빠르면 브러쉬 모가 빨리 닳아버립니다).
- ⑤ 브러쉬 시술 중, **충분한 [주수]**를해주세요.
- ⑥ Brushing Operation으로 임플란트의 표면(machined surface) 뿐 아니라 임플란트 주위의 오염된 연조직도 함께 제거합니다.
- ⑦ Brushing Time은 임플란트마다 다릅니다. 고급 외국산의 경우 1분 정도면 충분하지만, 국산은 3분에서 5분 정도 걸리며, 그 이상 소요되는 경우도 있습니다.
- ⑧ Brushing을 하시다 보면, 어두운 임플란트 표면의 shade가 밝은 톤으로 변하는 것은 육안으로 확인할 수 있습니다.
- ⑨ 임플란트표면이 어느 정도 밝은 톤으로 변하면 Brushing 과정은 끝난 것입니다.
- ⑩ Brushing 후, 테트라사이클린으로(주사기 사용) 린스해 주세요(2-3분). (선호하시는 다른 화학적 처치[미노사이클린 등]를 선택하셔도 무방합니다).
- ⑪ 테트라사이클린으로 린싱한 후 셀라인으로 세척해 주세요.
- ⑫ GBR로 마무리 하시면 됩니다(포켓이 깊은 경우 멤브레인으로 마무리 하시면 효과적입니다).

2024년 06월 (주)한스코리아 올림.